

ANIOSYME DLT PLUS

Detergente tri-enzimático para uso em lavagem manual, ultrassônica e automática

Para utilização em lavagem manual:

1. Diluição: 5 ml./l.
2. Temperatura manual: 30° a 40°C
3. Imergir o instrumental e escovar, se necessário.
4. Tempo de imersão sugerido: 5 minutos.
5. Enxaguar cuidadosamente o instrumental.
6. Secar bem o instrumental.
7. Armazenar o galão bem fechado em local seco e fresco.

Para utilização em Lavadora Ultrassônica

1. Posicione o cesto na cuba.
2. Coloque água no tanque, imergindo todo o material
3. Acrescente Aniosyme DLT Plus. Diluição: 5 ml./L (adequar conforme capacidade de água da lavadora)
4. Ligue o aparelho
5. Ao ligar, selecione no display do equipamento as opções para Temperatura e tempo. .
6. Escolha a temperatura de trabalho (40° a 60°).
7. Pressione a tecla para iniciar o ciclo Selecione o tempo desejado (mínimo de 5 minutos)
8. Pressione a tecla para iniciar o ciclo
9. Após o término da lavagem, retire o cesto com os instrumentos e enxágue-os em água corrente.
11. Sugerimos a troca da solução de acordo com o protocolo da instituição.

Canulados:

1. Conecte os instrumentos canulados.
2. Ligue o aparelho
3. Selecione o tempo desejado
4. Sugerimos a troca da solução de acordo com o protocolo da instituição.

Instruções para descarte da solução e limpeza da lavadora

1. Acione a válvula para escoamento da solução.
2. Lave o tanque com água, retirando os resíduos.
3. Seque utilizando uma flanela ou um papel de alta absorção.
4. Fecha a válvula