

OXY'FLOOR

Detergente desinfetante hospitalar para a limpeza e desinfecção de superfícies fixas e artigos não-críticos

Utilização Técnica:

1. Utilizar luvas de proteção.
2. Encher um balde de água morna ou fria com 5 litros de água.
3. Colocar um sachê (dose de 25 g) no balde de lavagem.
4. Espalhe bem o produto na superfície, respeitando o esquema de limpeza: do fundo para saída.
5. Deixe o produto agir de 5 a 30 minutos, dependendo do nível de eficácia antimicrobiana.
6. Mudar os panos sempre que necessário. Colocar o pano sujo no recipiente previsto para esta situação.
7. Não é necessário enxaguar, a menos que a superfície entre em contato prolongado com a pele.
8. Limpar e desinfetar frequentemente conforme a necessidade e protocolos existentes.
9. Conservação da solução diluída em recipiente aberto: 8 horas
10. Após a limpeza de cada setor, trocar o pano e descartar a solução.

Restrições de uso:

1. Não misturar com outros produtos.
2. Não utilizar para desinfecção de alimentos.
3. Não ingerir.
4. Não inalar.
5. Não aplicar sobre pessoas, alimentos e animais.
6. Proibido reutilizar a embalagem.

Modo de Utilização

