

Steranios 2% **Glutaraldeído 2%**

Utilização Técnica:

1. Solução pronto uso, com estabilidade de até 30 dias.
2. Tempo de contato: 10 minutos
3. Fazer uso de EPI.
4. Utilizar cuba apropriada e que não tenha sido utilizada por outros produtos químicos.
5. Manter o recipiente tampado.
6. Promover a limpeza, enxágue e **secagem dos materiais antes de imergir na solução.**
7. Após imersão, lavar e secar cuidadosamente os materiais.
8. Manter o galão bem fechado e em local arejado, no caso da não utilização total do mesmo.

Fita Reagente de Controle:

1. Realizar o teste diariamente para constatar se a solução está ativa.
2. Embeber o papel indicador da fita na solução.
3. Eliminar o excesso da solução.
4. Ler o resultado após 15 segundos.
5. Não interpretar o resultado após 30 segundos.
6. Manter o frasco da fita em local arejado, seco, longe da luz solar e em temperatura de armazenamento de 4C° a 30C°.
7. Validade da tira após aberta: 90 dias.

LEITURA DA FITA



Rosa



Laranja ou laranja com borda de rosa